


Mijn Score zadelkruk: optimaal bedieningsgemak

- 1** De lendensteun is anatomisch vormgegeven en biedt een goede ondersteuning van je onderrug. Schouders en armen hebben optimale bewegingsvrijheid
- 2** Anatomisch gevormd zadel, zodat het bekken kantelt, en de wervelkolom in de juiste positie wordt bewogen voor een ontspannen houding.
- 3** Om je zadelkruk met neigmechaniek juist af te stellen, trekt u de zithoekhendel omhoog en buigt u gelijktijdig je bovenlichaam iets naar voren. De zadelzitting kantelt en zorgt voor een correcte en gezonde rughouding.

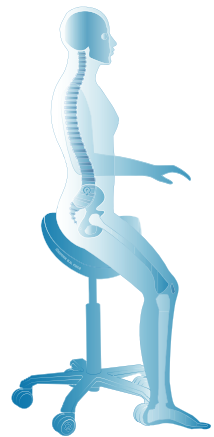

- 4** Om je zadelkruk op de juiste hoogte af te stellen trekt u de gaslifthendel omhoog. Je zadelkruk heeft de juiste zithoogte als je voeten op de grond staan en je knieën licht gebogen zijn.
- 5** Kies voor het unieke Score Balance mechaniek voor actief zitten. De zitting "beweegt 360° mee" en zorgt ervoor dat je bekken- en rughouding optimaal gepositioneerd blijven.



- 6** Standaard voorzien van een Ø 54 cm kruispoot en grote zwenkwielen ter verhoging van de mobiliteit.



Probeer de Score zadelkruk gratis uit.
Vraag er naar bij je Score dealer of neem contact op via info@scorenl.com



Zadelkrukken Jumper en Amazone

- comfortabel en ergonomisch gevormde zadelzitting voor een gezonde zithouding
- voor een perfecte pasvorm, verkrijgbaar in twee zadelmaten
- uniek verstelbaar Score Balance mechaniek voor actief zitten
- naadloze antibacteriële stoffering (optioneel) voor hygiënische werkplekken
- verkrijgbaar in een stijlvolle "Bicolor" uitvoering
- 5 jaar garantie

jouw score dealer



Score BV
Feithspark 5
9356 BX Tolbert
Nederland
T. +31 (0)594-554000
F. +31 (0)594-554040
E. info@scorenl.com
W. zitten.nl

Made in Holland

www.zitten.nl


Balance Lendensteun

Zoek je tijdens het actief zitten een ontspan momentje? Kies voor een Score Balance Amazone zadelkruk met Lendensteun.

Het anatomisch gevormde zadel kantelt automatisch je bekken waardoor je rug een natuurlijke en ontspannen houding aanneemt. Het Balance mechaniek laat je als het ware "balanceren" zodat je een actieve zithouding krijgt.

Dit bevordert je bloedsomloop. Bovendien train je je rug- en buikspieren. Een ergonomische work-out terwijl je zit.

De meebewegende lendensteun biedt lichte ondersteuning voor je onderrug voor een momentje van ontspanning tijdens je dagelijkse werkzaamheden.

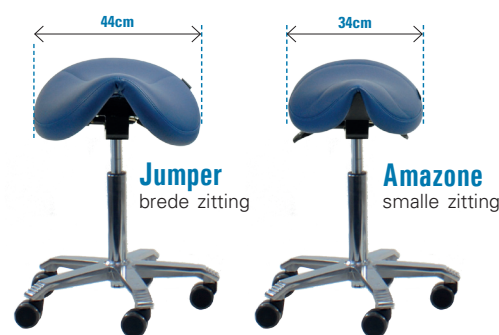

Perfekte pasvorm; verkrijgbaar in twee maten

Score zadelkrukken zijn verkrijgbaar in twee verschillende zadelpasvormen: de Jumper met een brede zitting en de Amazone met een smalle zitting.

Maximale hygiëne

Op werkplekken waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld kunt u kiezen voor een anti-bacteriële en naadloze stoffering. Vraag naar de anti-bacteriële stoffering opties bij je Score dealer.



Lendensteun

De zadelkruk kan worden voorzien van een ergonomisch gevormde lendensteun. De uitgekiende vormgeving geeft bewegingsvrijheid en is in hoogte en hoek te verstellen.



Armleggers

Armleggers bieden extra ondersteuning voor armen, met als doel nek- en schouderklachten te voorkomen of te verminderen. De Barrage is standaard voorzien van een lendensteun en twee ergonomische armleggers.



Jolly

Zadelkruk met een zitting in de vorm van een fietszadel en een vaste zithoek. Ideale mobiele stahulp en ook zeer goed inzetbaar voor werkplekken met beperkte beenruimte.




Balance gezond actief zitten

Het unieke instelbare Balance-mechaniek stimuleert gezond en actief zitten. Door het Balance mechaniek bent u constant in beweging en traint u buik- en rugspieren.

De mate van beweging van het Balance-mechaniek is, door aan de ring onder het zadel te draaien, geheel naar eigen voorkeur in te stellen.

De zadelvorm zorgt voor een goede zithouding. Het unieke Score Balance-mechaniek gecombineerd met de Jumper of Amazone zadelzitting is een veelzijdig probleemoplosser.

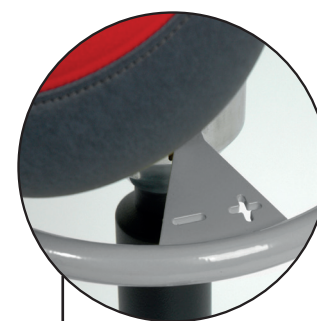


360° Support

360° rond te draaien armlegger/rugleuning. Eenvoudig uit de weg te draaien. Voor ondersteuning van één of beide armen.



"Handsfree" hoogteverstelling

De zadelkrukken kunnen worden uitgerust met een voetbediening. Erg handig, indien u beide handen voor je werkzaamheden vrij en/of steriel dient te houden.

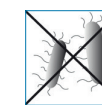

Anti bacterieel

Amazone RVS

Ideaal voor hygiënische en/of vochtige werkplekken waar veelvuldig gereinigd wordt zoals de voedingsindustrie en ziekenhuizen. RVS is bestand tegen veelvuldig reinigen met desinfecterende middelen en RVS biedt minder kans voor de aangroei van bacteriën. Door de hoge poten kan de vloer gemakkelijk gereinigd worden. De zadelzitting is vervaardigd uit Pur (polyurethaan) en is brandwerend, CFK vrij en bestand tegen diverse agressieve chemische stoffen.




Amazone/Jumper ESD of Cleanroom

Een ESD veilige zadelkruk beschikt over geleidende componenten en stoffering (1Mohm) voor een gecontroleerde ontlading. Score ESD producten voldoen aan de norm IEC 61340-5-1 De Cleanroom versie is Klasse 3 getest door het "Fraunhofer Instituut".

Amazone Pur

De Amazone zadelzitting is ook verkrijgbaar in Pur (polyurethaan) Pur is bestand tegen diverse chemische stoffen en gemakkelijk te reinigen. Tevens is de Amazone met lendensteun te verkrijgen.

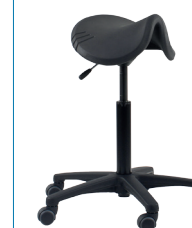

Over Score

Score is een Nederlands familiebedrijf dat al 4 decennia gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van ergonomische stoelen en accessoires. In dit marktsegment is Score één van de leidende spelers in Europa.

Score zadelkrukken zijn vooral bekend vanwege de ergonomische eigenschappen. In Europa heeft Score de standaard gezet als het gaat om de kwaliteit van zadelkrukken. Score zadelkrukken worden wereldwijd gedistribueerd.

Van tekentafel tot productie en uitgebreide praktijktests; het volledige ontwikkelingsproces vindt plaats in eigen huis. En om de hoge kwaliteit te garanderen, worden alle Score producten exclusief gedistribueerd via zorgvuldig geselecteerde dealers.

Stoffering:

Verkrijgbaar in Stamskin® TOP, PUxx nr. 1, Trevira (stof) en Kunstleer zwart.

Stamskin



Bicolor Stamskin

