

COVID-19 (her)opstart protocollen dentale equipment



Checklist Behandeleenheden

- Desinfecteer alle contactpunten en horizontale oppervlakken met alcohol 80%.
- Alle "O" ringen invetten met zuurvrije vaseline (*afzuigerhandstukken, micromotoren en turbinekoppelingen*).
- Reinigen afzuigslangen; spoelen met MD555 (*minimaal half uur in laten trekken - max 2 uur*).
- Activeer spoelprogramma's, let op de duur! (*bv. DentsplySirona kent een 24-uursprogramma*).

Gebruik hiervoor de juiste procedure en middelen, raadpleeg onze website voor de [hygiëneprotocollen](#) van onze fabrikanten.

Enkele te gebruiken desinfectiemiddelen per fabrikant:

- Anthos: PEROXY AG+
- KaVo: OXYGENAL
- DentsplySirona: DENTOSEPT
- Dürr afzuigmotoren: OROTOL

- Controleer de waterkwaliteit door na het spoelprogramma een test uit te voeren.
- Reinig de afzuigingen en vervang de betreffende filters. Zuig enkele liters water op voor het spoelen van de leidingen en gebruik de desinfectiemiddelen die bij de afzuigmotor horen, bv. OROTOL bij Dürr afzuigmotoren.

Checklist Technische Ruimte

- Laat de afzuigmotor minimaal 10 minuten draaien om "warm te draaien".
- Laat de compressor minimaal 10 minuten draaien om "warm te draaien".
- Vervang de filters.
- Controleer het reservoir (opvangbakje) van de amalgaamscheider.

Checklist Röntgen / Röntgenruimte

- Desinfecteer alle contactpunten en horizontale oppervlakken met alcohol 80%.

Checklist CEREC

- Nieuwe filter in de watertank plaatsen.
- Watertank vullen en pomp weer aanzetten conform de standaardprocedure.

Voor alle vragen i.v.m. technische ondersteuning kunt u ons mailen via tdplanning@henryschein.nl met de gegevens van uw praktijk en uw vraag. Een medewerker van het betreffende team zal contact met u opnemen voor een afspraak.