

11 Operationele onderbrekingen

Duur van de operationele onderbreking	Maatregel
Korte pauzes tussen twee sterilisaties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De deur gesloten houden om energie te besparen ▪ Energiebesparingsmodus instellen
Pauzes langer dan een uur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoclaaf uitschakelen
Langere pauzes, bv. 's nachts of in het weekend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoclaaf uitschakelen ▪ Deur laten steunen om voortijdige uitputting of vastkleven van de deurdichting te voorkomen ▪ Indien aanwezig de watertoevoer van de waterzuiveringsinstallatie dichtdraaien
Langer dan twee weken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een vacuümtest uitvoeren ▪ Na succesvolle vacuümtest lege sterilisatie in Snel-Programma S uitvoeren

Voer na pauzes en afhankelijk van de duur van de pauzes de in het hoofdstuk [Functiecontroles](#) [▶ pagina 31] beschreven tests uit.