

De fabrikant van **CONTOUR®** producten introduceert

Single-Let™: steriele, veiligheidslancetten, voor eenmalig gebruik

Single-Let™ is ontworpen:

VEILIG

- Om u en uw patiënten te beschermen tegen prikincidenten

COMFORTABEL

- Met het oog op comfort voor uw patiënt: 28 gauge, prikdiepte van 1.6 mm.


EENVOUDIG

- Om snel te kunnen prikken, met slechts 3 handelingen (z.o.z.)

Ergonomische T-vorm voor **stevige grip** bij het dragen van handschoenen.

28 gauge
gamma-gesteriliseerde naald

Gecontroleerde prikdiepte (1.6 mm)

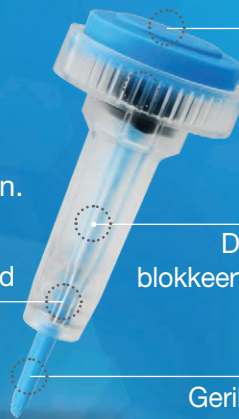

Vingeruitsparing voor activering van de **drukknop**

De naald trekt automatisch terug en blokkeert zodat **hergebruik onmogelijk** is.

Geribbeld beschermkapje voor steriele naald en stevige grip bij het **losdraaien**.

Afbeelding is niet op ware grootte

NIEUW

Single-Let™ is eenvoudig te gebruiken in 3 stappen



1

Draai het beschermkapje los.

2

Trek het beschermkapje los van de naald.



3

Neem het lancet tussen duim en vingers met de duim op de punctiedop. **Druk** op de knop om de Single-Let™ te activeren.

LET OP: alleen gebruiken voor bloedafname uit vingers



Single-Let is verkrijgbaar in een kartonnen dispenser met 200 lancetten.

Art nr: 85956817

Z-index nr: 16577825

Single-let bestellen gaat eenvoudig. Wij helpen u graag!

U kunt contact opnemen met uw Account Manager, of met onze afdeling Klanten Service:

Bel gratis: 0800 235 22 937

maandag t.m. vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur

Email: info@diabetes.ascensia.nl

www.diabetes.ascensia.nl

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo, Contour en Single-let zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden. Datum van voorbereiding: oktober 2017. Code: G.DC.10.2017.52560.