



100% plasticvrije reinigings- en desinfectiedoekjes, geïmpregneerd met een laag alcoholische oplossing.

## mikrozid® universal wipes green line

### Onze pluspunten

- 100% plasticvrije doekjes
- duurzaam en klimaatneutraal
- zeer materiaalvriendelijk
- korte inwerktijd
- breed werkingsspectrum
- uitstekende reinigingsprestaties
- dermatologisch getest
- toegelaten in Nederland, België en Luxemburg: 16561 N, BE-REG-01707, 81/22/L

### Toepassingsgebied

Deze op laag alcohol gebaseerde doekjes werken snel en effectief en zijn geschikt voor reiniging en desinfectie van medische apparatuur en andere oppervlakken. Tevens geschikt voor desinfectie van gevoelige apparatuur en oppervlakken zoals smartphones, tablets, toetsenborden en bedieningspanelen.

### Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil wordt verwijderd alvorens te desinfecteren met de mikrozid® universal wipes. Veeg het oppervlak grondig af met het geïmpregneerde doekje en laat het inwerken. Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig nat zijn en blijven gedurende de hele inwerktijd. Houd bij het openen en het eruit halen van het eerste doekje de hygiënische aspecten in acht en sluit het deksel na gebruik. Niet geschikt voor einddesinfectie van semi-kritische en kritische medische hulpmiddelen. Het product kan zonder handschoenen worden gebruikt. schülke garandeert een houdbaarheid van 1 maand na openen van de verpakking.

### Microbiologische werkzaamheid

| Werkzaamheid  | Concentratie  | Contacttijd |
|---|---------------|-------------|
| <b>bactericide</b><br>EN13727<br>- hoge belasting                       | gebruiksklaar | 15 sec.     |
| <b>bactericide</b><br>EN13727, EN16615<br>- lage belasting              | gebruiksklaar | 1 min.      |
| <b>tuberculocide</b><br>EN14348<br>- lage belasting                     | gebruiksklaar | 5 min.      |
| <b>levurocide</b><br>EN13624<br>- hoge belasting                        | gebruiksklaar | 1 min.      |
| <b>levurocide</b><br>EN16615<br>- lage belasting                        | gebruiksklaar | 1 min.      |
| <b>virucide tegen envelop virussen</b><br>- hoge belasting              | gebruiksklaar | 15 sec.     |
| <b>beperkt spectrum virucide werking</b><br>EN14476<br>- hoge belasting | gebruiksklaar | 15 min.     |
| <b>norovirus</b><br>EN14476<br>- lage belasting                         | gebruiksklaar | 30 sec.     |
| <b>norovirus</b><br>EN14476<br>- hoge belasting                         | gebruiksklaar | 60 sec.     |
| <b>polyoma SV40</b><br>- hoge belasting                                 | gebruiksklaar | 15 sec.     |
| <b>Rotavirus</b><br>EN14476<br>- lage belasting                         | gebruiksklaar | 15 sec.     |

CE 0297



# mikrozid® universal wipes green line

## Productinformatie

100 gr oplossing bevat de volgende actieve ingrediënten:  
17,4 gr propaan-2- ol, 12,6 gr ethanol (94% w/w) Etikettering volgens VO (EG) 648/2004:<5% anionische oppervlakteactieve stoffen

## Speciaal advies

Gebruik desinfectiemiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies. Oogcontact vermijden. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Het product heeft een goede materiaalcompatibiliteit met metalen en kunststoffen (behalve acrylglas en alcoholgevoelige verven).

## Bestelinformatie

| Artikel                                  | Eenheid | Artikel nr. |
|--|---------|-------------|
| mikrozid univ wipes green line 114 ST SP | 6/Doos  | 70003354    |
| mikrozid uni wip green lineBNL 114 ST SP | 6/Doos  | 70003434    |

## Verwante producten

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® sensitive wipes

## Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

## Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid producten is terug te vinden op internet via website [www.schuelke.nl](http://www.schuelke.nl)

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor; 0031 (0) 23 535 26 34 of international 0049 (0)40 521 00 666



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

**schülke Benelux**  
Schülke & Mayr Benelux B.V.  
Oudeweg 8d  
2013 CC Haarlem, Nederland  
Tel: +31 (0) 23 535 26 34  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[salesbenelux@schuelke.com](mailto:salesbenelux@schuelke.com)

**schülke hoofdkantoor**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Duitsland  
Tel: +49 40 - 52100 - 0  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)