



100% plasticvrije reinigings- en desinfectiedoekjes, geïmpregneerd met een laag alcoholische oplossing.

**BINNENKORT
GEREGISTREERD!**

mikrozid® universal wipes green line

Onze pluspunten

- 100% plasticvrije doekjes
- duurzaam en klimaatneutraal
- zeer materiaalvriendelijk
- korte inwerktijd
- breed werkingsspectrum
- uitstekende reinigingsprestaties
- dermatologisch getest
- toegelaten in België en Luxemburg: BE-REG-01707, 81/22/L

Toepassingsgebied

Deze op laag alcohol gebaseerde doekjes werken snel en effectief en zijn geschikt voor reiniging en desinfectie van medische apparatuur en andere oppervlakken. Tevens geschikt voor desinfectie van gevoelige apparatuur en oppervlakken zoals smartphones, tablets, toetsenborden en bedieningspanelen.

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil wordt verwijderd alvorens te desinfecteren met de mikrozid® universal wipes. Veeg het oppervlak grondig af met het geïmpregneerde doekje en laat het inwerken. Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig nat zijn en blijven gedurende de hele inwerktijd. Houd bij het openen en het eruit halen van het eerste doekje de hygiënische aspecten in acht en sluit het deksel na gebruik. Niet geschikt voor einddesinfectie van semi-kritische en kritische medische hulpmiddelen. Het product kan zonder handschoenen worden gebruikt. schülke garandeert een houdbaarheid van 1 maand na openen van de verpakking.

Microbiologische werkzaamheid

Werkzaamheid	Concentratie	Contacttijd
bactericide EN13727 - hoge belasting	gebruiksklaar	15 sec.
bactericide EN13727, EN16615 - lage belasting	gebruiksklaar	1 min.
tuberculocide EN14348 - lage belasting	gebruiksklaar	5 min.
levurocide EN13624 - hoge belasting	gebruiksklaar	1 min.
levurocide EN16615 - lage belasting	gebruiksklaar	1 min.
virucide tegen envelop virussen - hoge belasting	gebruiksklaar	15 sec.
beperkt spectrum virucide werking EN14476 - hoge belasting	gebruiksklaar	15 min.
norovirus EN14476 - lage belasting	gebruiksklaar	30 sec.
norovirus EN14476 - hoge belasting	gebruiksklaar	60 sec.
polyoma SV40 - hoge belasting	gebruiksklaar	15 sec.
Rotavirus EN14476 - lage belasting	gebruiksklaar	15 sec.

CE 0297



mikrozid[®] universal wipes green line

Productinformatie

100 gr oplossing bevat de volgende actieve ingrediënten:
17,4 gr propaan-2- ol, 12,6 gr ethanol (94% w/w) Etikettering volgens VO (EG) 648/2004:<5% anionische oppervlakteactieve stoffen

Speciaal advies

Gebruik desinfectiemiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies. Oogcontact vermijden. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Het product heeft een goede materiaalcompatibiliteit met metalen en kunststoffen (behalve acrylglas en alcoholgevoelige verven).

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
mikrozid univ wipes green line 114 ST SP	6/Doos	70003354
mikrozid uni wip green line NL 114 ST SP	6/Doos	70003434

Verwante producten

- mikrozid[®] AF wipes
- mikrozid[®] sensitive wipes

Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid producten is terug te vinden op internet via website www.schuelke.nl

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor; 0031 (0) 23 535 26 34 of international 0049 (0)40 521 00 666



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
www.schuelke.com
info@schuelke.com