



*Cavex s'est fixé pour  
objectif de vendre des  
systèmes intégraux  
ingénieux, dans  
lesquels chaque  
produit fait partie  
d'un tout.  
En appliquant  
cette philosophie,  
Cavex propose des  
solutions complètes  
qui permettent aux  
spécialistes  
dentaires d'augmenter  
considérablement le  
niveau du service  
offert à leurs patients  
For dental use only.*

# Cavex Instant Stone

**Un modèle en plâtre parfait en seulement 10 minutes**

Beaucoup de cabinets dentaires n'ont pas de local technique séparé et disposent rarement d'un malaxeur pour plâtre (sous vide). Ceci fait du malaxage du plâtre une activité compliquée.

Cavex Instant Stone est un plâtre composite qui permet en seulement 10 minutes de couler un modèle parfait pour la réalisation de gouttières de blanchiment, attelles et protège-dents. Grâce à quoi les "traitements", qui normalement demandent plusieurs visites, sont possibles en une seule séance. Cavex Instant Stone permet donc à la fois d'augmenter la productivité du cabinet et d'améliorer le service offert au patient.





**Cavex Holland BV**

P.O. Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

T +31 23 530 77 00

F +31 23 535 64 82

dental@cavex.nl

www.cavex.nl

- **Lisse et robuste**

Cavex Instant Stone est un composite plâtre révolutionnaire qui permet de couler en seulement 10 minutes des modèles parfaits. Les modèles durcis sont très robustes et ressemblent au toucher à du plastique. Les modèles réalisés avec Cavex Instant Stone présentent une très belle surface lisse et une exceptionnelle résistance à l'usure.

- **Rapide et propre**

Grâce à un système de mélange ingénieux unique en son genre, Cavex Instant Stone est très facile et rapide à utiliser et permet de réaliser un modèle en plâtre en peu de temps et proprement.

- **Précis et efficace**

La formule unique de Cavex Instant Stone offre à l'utilisateur la possibilité de fabriquer des modèles sans bulle, sans table vibrante.

①



Secouez d'abord bien le plâtre pour le détacher.

②



Retirez le bouchon rouge du flacon. Percez la feuille en appuyant avec le flacon.

③



En pressant, videz le contenu du flacon dans le récipient.

④



Mettez le bouchon rouge comme fermeture dans la feuille du récipient.

⑤



Placez le pouce sur le bouchon rouge et secouez fortement le récipient durant 30 secondes.

⑥



Versez d'abord une petite couche de plâtre directement du récipient dans l'empreinte.

⑦




Répartissez régulièrement le plâtre sur l'empreinte. (Veillez à ce que le plâtre coule bien dans toute l'empreinte. Pour favoriser cette répartition, vous pouvez taper légèrement l'empreinte sur la table.)

⑧



Remplissez ensuite complètement l'empreinte. (voir **SUGGESTION**)

⑨

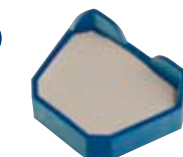

Utilisez le reste de plâtre pour remplir le socle.

⑩



En la retournant, placez l'empreinte dans le socle.

⑪



Au bout de 10 minutes, le modèle est assez durci, le retirer de l'empreinte.



**SUGGESTION: Vous pouvez aussi choisir de couler seulement la rangée dentaire.**

Suivez les étapes 1 à 8 et laissez simplement durcir la rangée dentaire. Veillez à ce que l'empreinte soit bien horizontale (de niveau) afin d'obtenir une surface de base bien plane. Les bords/côtés tranchants peuvent être arrondis avec un couteau Stanley ou polis avec un micromoteur.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Cavex au +31 23 530 77 00 ou consulter le site [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)

**Assortiment:**

**VT010** 4 x 18 (Instant Stone + Activator)

**CAVEX** FOR DENTAL USE ONLY