

# CaviCide<sup>TM</sup>

# CaviWipes<sup>TM</sup>

Reinigen, desinfecteren en ontsmetten van medische hulpmiddelen.



**3 in 1:** effectief reinigen, desinfecteren en ontsmetten zonder uw investeringen te beschadigen.

## Productomschrijving

- CaviCide™ is een multifunctioneel, intermediate level oppervlakte-desinfectiemiddel (Metrex<sup>3</sup>) speciaal aanbevolen voor instellingen en praktijken in de gezondheidszorg zoals poliklinieken, ziekenhuizen, particuliere huis- en tandartspraktijken, ambulances en langdurige zorginstellingen.
- CaviWipes™ zijn gebruiksklare non-woven doekjes verzadigd met CaviCide.

## De voordelen van CaviCide™ en CaviWipes™

- Doodt TBC, virussen, bacteriën en schimmels binnen 3 minuten (zie overzicht).
- **Effectief tegen het nieuwe Coronavirus COVID-19<sup>1,2</sup>.**
- Lage alcoholformule zorgt voor effectieve verwijdering van bioburden<sup>4</sup> en voorkomt beschadiging van (medische) apparatuur en oppervlakken.
- Bevat geen fenol, bleekmiddel of andere toxische chemicaliën.
- De non-woven doekjes drogen niet uit en klitten niet samen tijdens gebruik.
- Zonder geur- of kleurstoffen, onbrandbaar.
- Verkrijgbaar in spray, vloeistof of reinigingsdoekjes (canister en praktische flatpack meeneemverpakking o.a. voor huisbezoek).

## Compatibiliteit met andere materialen

CaviCide en CaviWipes worden aanbevolen op harde niet-poreuze oppervlakken. Dit omvat kunststoffen (zoals polycarbonaat, polyvinylchloride, polypropyleen en polystyreen) roestvrij staal, glas, plexiglas, nietporeuze vinylbekleding en geschilderde oppervlakken. CaviCide en CaviWipes zijn bijzonder compatibel met alle soorten afdrukmaterialen met inbegrip van siliconen en alginaten.



# Spectrum en desinfectietijden

<u>Organisme</u>	<u>Desinfectietijd</u>
Candida Albicans	1 minuut
Enterococcus Hirae	1 minuut
Escherichia Coli	1 minuut
Hepatitis B Virus (HBV)	2 minuten
Hepatitis C Virus (HCV)	2 minuten
Herpes Simplex Virus Type 1 and 2	2 minuten
Human Coronavirus	2 minuten
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)	2 minuten
Influenza A2 Virus	2 minuten
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)	3 minuten
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) <sup>1,2</sup>	5 minuten
Mycobacterium Tuberculosis Bovis (BCG)	3 minuten
Proteus mirabilis	1 minuut
Pseudomonas Aeruginosa	1 minuut
Salmonella Enterica	3 minuten
SARS-associated Human Coronavirus-1 (SARS-CoV-1)	3 minuten
Staphylococcus aureus	1 minuut
Staphylococcus aureus met verminderde gevoeligheid voor vancomycin	2 minuten
Trichophyton mentagrophytes	3 minuten
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)	2 minuten

## Referenties

<sup>1</sup> EN14476 tested using MVA (Modified vaccinia virus Ankara) as a surrogate representing enveloped virus.

<sup>2</sup> CaviWipes- ASTM E1053-11 tested against SARS-associated Human Coronavirus-1 (SARS- CoV-1), [a virulent strain of coronavirus closely-related to SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.]; CaviCide- ASTM E1053-11 tested against Human Coronavirus, [a virulent strain of coronavirus closely related to SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.]

<sup>3</sup> Metrex Research: <https://www.metrex.com>.

<sup>4</sup> Data and information from Environmental Surface Cleaning and Disinfection: Effects of Alcohol Concentration by John A. Molinari, Ph.D. and Peri Nelson, B.S., Dental Consultants, Inc., Ann Arbor, Michigan from The Dental Advisor, Number 27 – January 2016.

**CaviCide is CE-gecertificeerd en is in overeenstemming met de Richtlijnen voor Medische Hulpmiddelen: "The Medical Device Directive MDD 93/42/EEC."**

# Artikelnummers en bestelinformatie

Artikelnr.	Omschrijving	Min. bestelhoeveelheid
4731245	CaviWipes flatpack met 45 doekjes	Doos met 20 flatpacks
4731160	CaviWipes canister met 160 doekjes	Doos met 12 canisters
4731221	CaviCide sprayflacon 200ml	Doos met 15 sprayflacons
4731222	CaviCide sprayflacon 700ml	Doos met 15 sprayflacons
4731223	CaviCide container navulverpakking 5 L	Container 1 stuk
4731229	Pomp voor 5 L CaviCide container	Pomp 1 stuk



**Flatpack CaviWipes**  
45 doekjes van 17,5 x 22,5 cm



**Container CaviCide**  
Navulverpakking 5 L



**Sprayflacon CaviCide**  
200 ml / 700 ml



**Canister CaviWipes**  
160 doekjes van 15,24 x 17,15 cm



**Pomp**  
voor 5 L container CaviCide