


# FebriDx® Beknopte Handleiding


Een ongebruikte test geeft drie vage oranje lijnen te zien in het resultaatvenster.

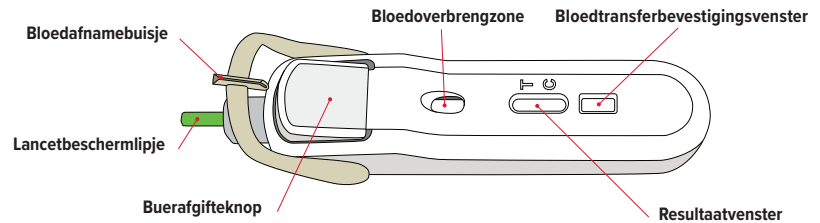

Ongebruikte Test



Lees de bijsluiter voordat u de test uitvoert. Volg alle stappen in de juiste volgorde.

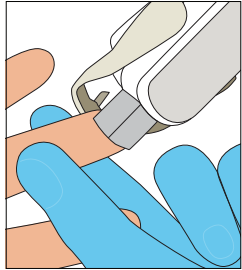

## 1 Vinger aanprikken


Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht voor het verzamelen en hanteren van een bloedmonster uit de vinger.

Maak de vingertip schoon met een alcoholdoekje en laat de vinger aan de lucht opdrogen. Plaats de lancet.

Draai en trek om het Lancetbeschermhoesje te verwijderen.

Druk de lancet stevig tegen de vinger om door de huid te prikken. De lancet trekt zich vanzelf terug.

Veeg de eerste druppel bloed met een gaasje weg.

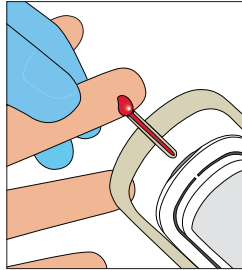


## 2 Bloed afnemen

Masseer de vinger voorzichtig om de bloedstroom te stimuleren en een druppel op te vangen die aan de vinger hangt.

Plaats het Bloedopvangbuisje in een hoek van 45 graden onder de vinger en maak contact met de hangende druppel. Vermijd direct contact met de vinger van de patiënt.

**ZORG ERVOOR DAT HET BLOEDOPVANGBUISJE HELEMAAL VOL IS.**

Als het bloedopvangbuisje niet helemaal vol is, knijp dan voorzichtig in de vinger en vang meer bloed op.

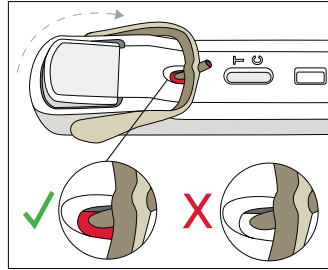

## 3 Bloed afgeven


Draai het Bloedopvangbuisje over de Bloedtransferzone heen wanneer het helemaal gevuld is met bloed.

**ZORG ERVOOR DAT HET BLOED NAAR DE TESTSTRIP WORDT OVERGEBRACHT.**

Wacht 5-10 seconden om verder te gaan met stap 4.

**Als het bloed niet meteen op de teststrip vloeit, draai dan het Bloedopvangbuisje terug naar de beginpositie.** Er zal enige weerstand voelbaar zijn.

Voeg nog een druppel bloed aan het Bloedopvangbuisje toe om het buisje te vullen, draai dan het Bloedopvangbuisje weer terug naar de teststrip.

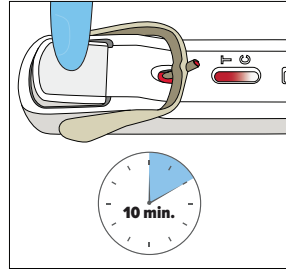


## 4 Buffer afgeven

**Het bloed moet zichtbaar zijn op de teststrip alvorens de buffer vrij te geven.** Activeer de test door de Buffervrijgiftekноп stevig en helemaal in te drukken om de buffer over te brengen.

**Als het bloed niet door het Resultaatvenster beweegt, druk dan nogmaals op de Buffervrijgiftekноп.**

Plaats op een vlak oppervlak. Lees na 10 minuten het resultaat af. Als het bloed na 10 minuten nog niet is opgeklaard, wacht dan tot de achtergrond is opgeklaard voordat u de testresultaten afleest. Lees na 1 uur geen testresultaten meer af.

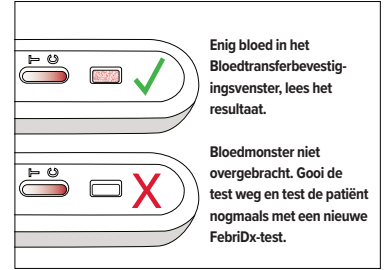

## 5 Controleer Bloedtransfer


Bevestig dat het **Bloedtransferbevestigingsvenster** van wit naar **roze/rood** is veranderd, wat aangeeft dat het bloedmonster correct is overgebracht.

Als het **Bloedtransferbevestigingsvenster** niet naar **roze/rood** verandert, is het monster niet correct overgebracht en moet de test worden herhaald.

## Hoe de FebriDx® resultaten af te lezen

Lees na 10 minuten het resultaat af. Als het bloed na 10 minuten nog niet is opgeklaard, wacht dan tot de achtergrond is opgeklaard voordat u de testresultaten afleest. Lees na 1 uur geen testresultaten meer af.


In het Resultaatvenster moet een **blauwe** controlelijn verschijnen, anders is de test niet geldig.

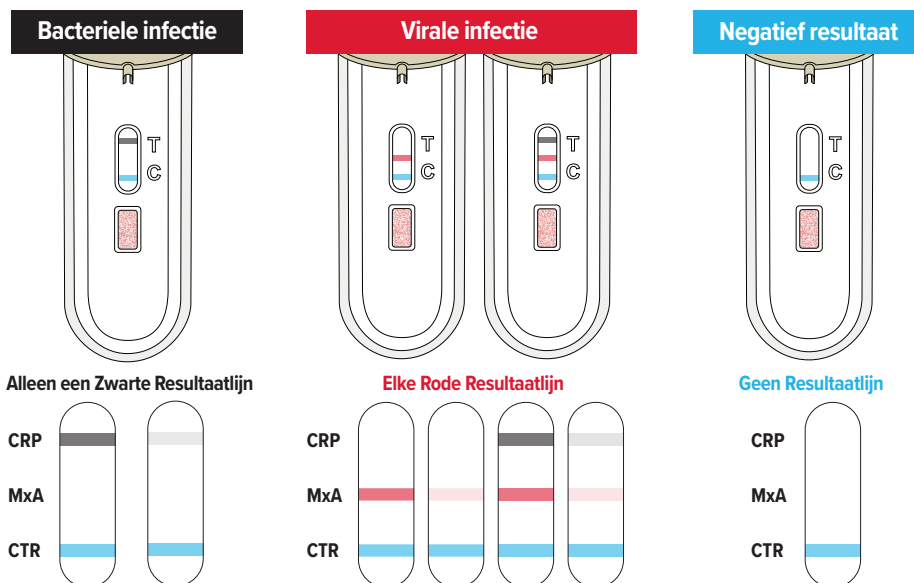

## Belangrijke opmerkingen

Zelfs als de resultaatlijn slechts zwak gekleurd is, niet geheel over de breedte van het Resultaatvenster ligt of ongelijkmatig van kleur is, moet het resultaat als positief worden beschouwd.

Als er geen blauwe controlelijn verschijnt, dan is de test ongeldig.

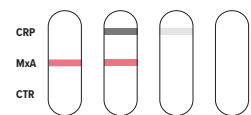

**FebriDx®**

FebriDx.com • info@FebriDx.com